
















SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
EMATOLOGIA - URGENZE Emocromo EMATOLOGIA (provetta PEDIATRICA) Emocromo – Reticolociti - Emocromo + Formula BNP (Peptide Natriuretico) CONTA LEUCOCITI SU LIQUIDI CAVITARI PARASSITA MALARICO ESAMI IN SERVICE	Viola trasparente 	13 x 75 2 ml EDTA k2	368841	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
COAGULAZIONE PT – PTT – Fibrinogeno – Antitrombina - D-Dimero	Azzurro 	13 x 75 2,7 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363048	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.
ESAMI COAGULAZIONE IN SERVICE	Azzurro con anello rosa 	13 x 75 2,7 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363048	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.
CHIMICA CLINICA - URGENZE MARCATORI DI DANNO MIOCARDICO - URGENZE PROCALCITONINA ESAMI IN SERVICE	Verde 	13 x 75 4 ml Eparina di litio (68 IU)	368884	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
CHIMICA CLINICA – URGENZE (provetta PEDIATRICA)	Verde trasparente 	13 x 75 2 ml Eparina di litio (34 IU)	368494	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)

SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
ESAMI SU SIERO (provetta esclusiva per il NIDO)	Giallo 	Microtainer 9 x 45 0,4 – 0,6 ml Separatore	365968	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
EMATOLOGIA (provetta esclusiva per il NIDO)	Lilla 	Microtainer 13 x 75 0,25 – 0,5 ml EDTA K2 (1 mg)	363706	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
INDAGINI VARIE Ammonio (in ghiaccio) Emoglobina Glicata Elettroforesi dell'emoglobina	Blu notte 	13 x 75 2 ml EDTA k2 (3,6 mg)	368843	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
EMATOLOGIA Emocromo – Reticolociti - Emocromo + Formula - VES CHIMICA CLINICA Omocisteina (in ghiaccio)	Viola 	13 x 75 3 ml EDTA k2 (5,4 mg)	364664	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)








TIPOLOGIA DELLE PROVETTE

SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
CHIMICA CLINICA - ROUTINE Glucosio (solo per UU.OO) – Urea – Creatinina – Acido Urico – Colesterolo – Trigliceridi – HDL-Colesterolo – LDL-Colesterolo – Bilirubina – Colinesterasi – Amilasi – AST – ALT – CK – γ GT – LDH – ALP – Elettroliti – Calcio – Fosforo – Magnesio – Ferro – Litio – Proteine Totali – Albumina Carbamazepina – Digossina – Acido Valproico - PCR – Lipasi - Transferrina totale – RF - TAS – IgG – IgA – IgM – C3 – C4 - Beta 2 Microglobulina	Blu Chiaro 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	368966	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
MARCATORI TUMORALI - ENDOCRINOLOGIA CEA – Alfafetoproteina – PSA – CA 125 – CA 15.3 – CA 19.9 - Ferritina - FT3 - FT4 – TSH – TSH riflesso - LH – FSH – Prolattina – Estradiolo E2 – Progesterone - Curva LH – Curva FSH – Curva Prolattina - Beta HCG - Testosterone – Cortisolo – Cortisolo Frazionato – Insulina – Curva Insulina – PTH intatto - Anticorpi anti-tiroide (anti-TPO e anti-TG) - Vitamina B12 – Acido folico - Vitamina D – EBV VCA IgG – EBV VCA IgM				
SIEROLOGIA INFETTIVA - HBsAg – HBcAb - HBeAg - HBeAb - HBsAb - HCVAb – HIV 1-2 Ab - Toxoplasmosi – Rosolia – Citomegalovirus – Avidità Toxo IgG - Avidità CMV IgG - Sifilide EIA – HBcAb IgM	Ruggine 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	368965	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
SIEROLOGIA RPR MNI Test MYCOPLASMA PNEUMONIAE IN URGENZA	Oro bassa 	13 x 75 2,5 ml Attivatore e separatore	366882	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
PROTEINE – ELETTROFORESI Elettroforesi Siero Immunofissazione Siero	Rosa bassa 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	362074	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)




SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
AUTOIMMUNITA' – ALLERGOLOGIA ANA – AMA – ASMA – ACA - APCA – LKM – ENA Screening – DNA – CCP - ENA Antigeni Nucleari (RO LA RNP SM SCL70 JO1) Cardiolipina IgG/IgM Beta2 Glicoproteina IgG/IgM Anti-Gliadina IgA/IgG Anti-transglutaminasi IgA/IgG Anti-endomisio IgA - IgE Totali - IgE specifiche (RAST)	Oro Alta 	13 x 100 5 ml Attivatore e separatore	367955	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
CRIOGLOBULINE	Beige alta 	13 x 100 6 ml Attivatore	368863	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
BIOLOGIA MOLECOLARE HCV-RNA - HCV-RNA Genotipo - HBV-DNA	Perla Anello Rosa 	13 x 100 5 ml Attivatore e separatore	362795	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
ESAMI DA INVIARE IN SERVICE NB: solo per esami su siero	Rosso alta 	13 x 100 6 ml Attivatore	368815	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
GLICEMIA AMBULATORIALE (per UU.OO solo se ai fini diagnostici) CURVA GLICEMICA PROFILO GLICEMICO GLUCOSIO POST-PRANDIALE	Grigio/anello bianco 	13X75 2mL FC Mix Tampone citrato Sodio Fluoruro (EDTA)	454511 Vacvette	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)



TIPOLOGIA DELLE PROVETTE

SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
TOSSICOLOGICI: RICHIESTA SOLO DA PRONTO SOCCORSO	Grigio 	13X 75 4 ml (10 mg) Potassio Ossalato (8 mg)	368921	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
COAGULAZIONE PEDIATRICA PT - PTT - Fibrinogeno – Antitrombina D-dimero Dosaggio PIASTRINE in PSEUDOPIASTRINOPENIA da EDTA	Azzurro trasparente 	13 x 75 1,8 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363047	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.
URINE DEL MATTINO Esame urine	 BLU	Provetta a fondo conico	/	/
URINE RANDOM Amilasuria URINE 24 ORE non trattate Proteine, Glucosio – Elettroliti – Clearance creatinina URINE 24 ORE raccolte con aggiunta di acido Calcio – Fosforo – Magnesio URINE 24 ORE raccolte con aggiunta dibicarbonato di sodio Acido urico	 BLU	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE DEL MATTINO Albuminuria	 ROSSO	Provetta a fondo cilindrico	/	/



SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
URINE MATTINO RANDOM Gravidanza – Droghe - Calcoli urinari URINE 12 ORE Conta di Addis URINE RANDOM Bence Jones URINE 24 ORE non trattate Elettroforesi urine – Cortisolo urine	 VERDE	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE ESAMI IN SERVICE HSR	 GIALLO	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE TOSSICOLOGICI: RICHIESTA SOLO DA PRONTO SOCCORSO	 TAPPO A VITE	Provetta tappo a vite	/	/

Aggiornato _____ Firma _____

Verificato e confermato in data _____ Firma _____